



Peristeen Anaalitamponi

Pienellä apuvälineellä apu
isoon ongelmaan

Peristeen



Peristeen Anaalitamponi

Loppu ulosteinkontinenssille

Kaikki, esim. ne joilla on spina bifida (selkäydinkohju), eivät pysty kontrolloimaan eritteen poistumista suolistostaan.

Peristeen Anaalitamponista on suuri apu ulostamisen kontrolloinnissa.

Peristeen Anaalitamponi on valmistettu polyuretaanivaahdosta, jonka päällä on vesiliukoinen kalvo. Anaalitamponi vastaa kooltaan tavallista peräpuikkoa, ja sen naru on sideharsoa.



Tehokas

Kun **Peristeen** Anaalitamponi on paikoillaan peräsuolella, kehon kosteus ja lämpö sulattavat tamponin päällä olevan vesiliukoisesta kalvon, ja Anaalitamponi laajenee noin 30 sekunnissa kuppimaiseksi estäen tehokkaasti ulosteen.


Luotettava

Käyttäjät arvostavat **Peristeen** Anaalitamponia sen tehokkuuden ansiosta. Lapset ja aikuiset voivat viettää huoletonna sosiaalista elämää missä sitten ovatkin; kotona, kylässä tai vaikkapa uimassa.



Turvallinen

Peristeen Anaalitamponia voi käyttää 12 tuntia. Se on helppo poistaa vetämällä pehmeästä, vahvasta ja tiukasti kiinnitystä sideharsonarusta. Uusi **Peristeen** Anaalitamponi voidaan asettaa paikalleen välittömästi edellisen poiston jälkeen.

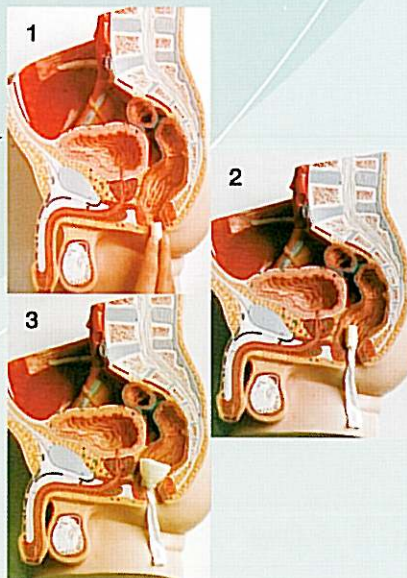

Miellyttävä

Polyuretaanivaahto on huokoista, ja kaasut läpäisevät sen. **Peristeen** Anaalitamponi pysyy miellyttävän pehmeänä käytön ajan. **Peristeen** Anaalitamponin käyttö estää ihoärsytystä ja epämiellyttävää hajua.

Tuotevalikoima

Tuote-numero	Koko	Kpl/ltk
1450	Small laajenee 37 mm:iin asti	20
	Large laajenee 45 mm:iin asti	20

Kertakäyttöinen.



Coloplast A/S Suomen sivuliike
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa
Puh. (09) 894 6750
Fax (09) 890 022

www.coloplast.fi