

WASH AWAY THE PROBLEM



Suolihuuhtelu
Käyttöohjeet

Peristeen


 Coloplast

Valmistelu

Peristeen suolihuuhtelu tehdään yleensä wc-istuimella istuen

Vaihe 1. Avaa korkin kansi ja täytä pussi kehonlämpöisellä vedellä. Sulje kansi napsauttamalla se kiinni.



- Pussi pitää laittaa täyteen vettä, vaikka koko vesimäärää ei käytetäkään huuhtelussa.

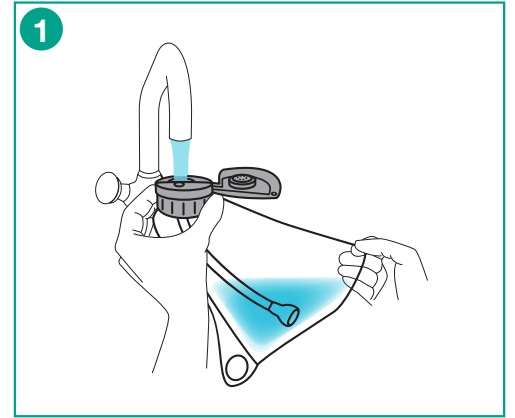



Vaihe 2. Avaa katetripussia 2 - 3 cm


Vaihe 3. Yhdistä vesipussi, ohjausyksikkö ja kertakäyttöinen katetri; harmaa harmaaseen ja sininen siniseen liittimeen

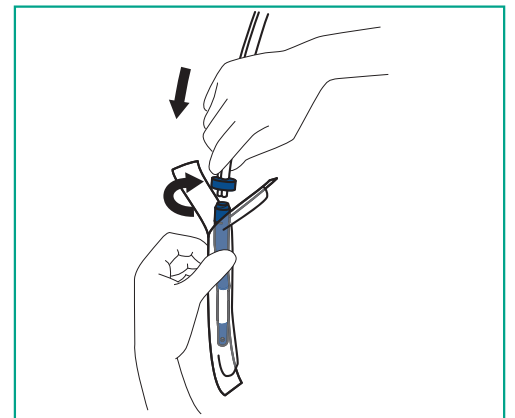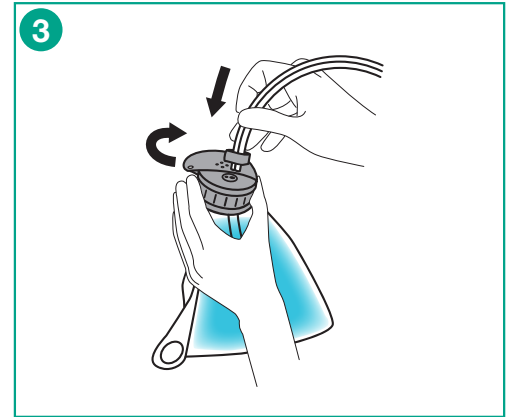- Lukitse yhdistäjät kääntämällä niitä 90 astetta myötäpäivään.
- Kiinnitä halutessasi ohjausyksikkö ja letkusto reiteen kiinnitysnauhojen avulla.



Vaihe 4. Käännä ohjausyksikön valitsin veden symbolin  kohdalle ja pumpppaa vettä (2 - 3 kertaa) katetripakkaukseen peittääksesi katetrin vedellä. Vesi aktivoi katetrin pinnan ja siitä tulee liukas.


- Käännä valitsin ballongin symbolin  kohdalle pysäyttääksesi veden virtaus.
- Odota vähintään 30 sekuntia.
- Älä käytä mitään ylimääräistä liukastetta (esim. vaseliinia), joka voi vahingoittaa ballongin materiaalia.

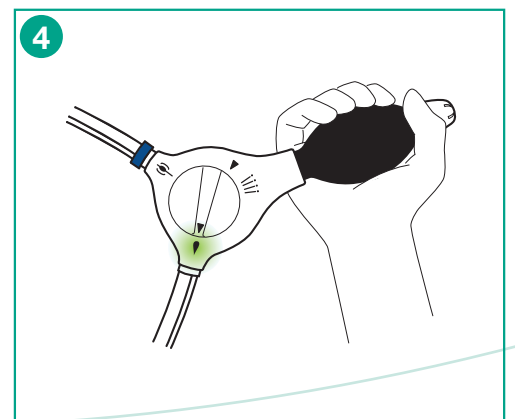


Rektaalikatetrin sisäänvienti

Vaihe 5. Vie rektaalikatetri varovasti peräsuoleen ja täytä ballongi


- Vie katetri peräsuoleen ottamalla kiinni katetrin päässä olevasta asettimesta. Vie katetri peräsuoleen niin pitkälle kuin asetin sallii. Asetin on katetrin se osa, joka levenee katetrin yläosassa.
- Pidä katetrusta kiinni ja täytä ballongi.
- Pumppausten määrä vaihtelee yksilöittäin. Tavallisesti 3 - 4 pumppausta on riittävä määrä tavalliselle katetrille (enintään 5 pumppausta) ja 1 - 2 pumppausta pienelle katetrille (enintään 2 pumppausta).

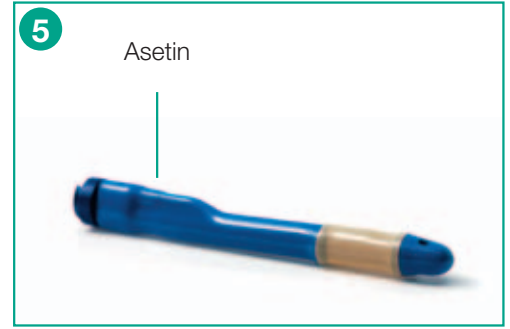

Veden pumppaaminen

Vaihe 6. Käännä valitsin veden symbolin  kohdalle ja aloita veden pumppaaminen (yksi pumppaus sekunnissa) peräsuoleen.

- Tarvittava veden määrä vaihtelee yksilöittäin; keskimäärin 750 ml on riittävä määrä aikuisille (500 ml uusille käyttäjille) ja 200 - 500 ml lapsille.
- Voi mennä muutama minuutti, jotta saat pumpattua riittävän määrän vettä.

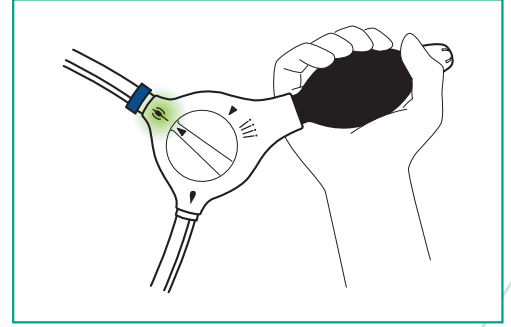

Katetrin poisto



Vaihe 7. Käännä valitsin ilman symbolin  kohdalle tyhjentääksesi ballongin; sitten poista katetri.

- Katetri liukuu usein pois itsestään; ellei, niin vedä katetri ulos varovasti.

Suolen tyhjentäminen


Vaihe 8. Suoli alkaa tyhjentyä itsestään.


- Jos mitään ei tapahdu vähään aikaan katetrin poiston jälkeen, voi suolen tyhjentymistä nopeuttaa yskimällä tai kevyesti painelemalla vatsan yläosaa.
- Tyhjentymisaika on yksilöllinen, mutta keskimäärin siihen menee 10 - 30 minuuttia. Suolen tyhjennyttyä voi wc:stä poistua.
- Uusien käyttäjien kannattaa viipyä wc:ssä niin pitkään, että he tuntevat suoliston tyhjentyneen kokonaan. Tähän voi mennä aikaa 30 minuuttia. Kun henkilö oppii tuntemaan, miten hänen kehonsa reagoi huuhteluun, wc:ssä vietetty aika yleensä vähenee.

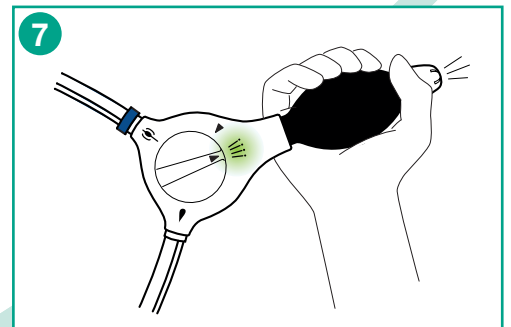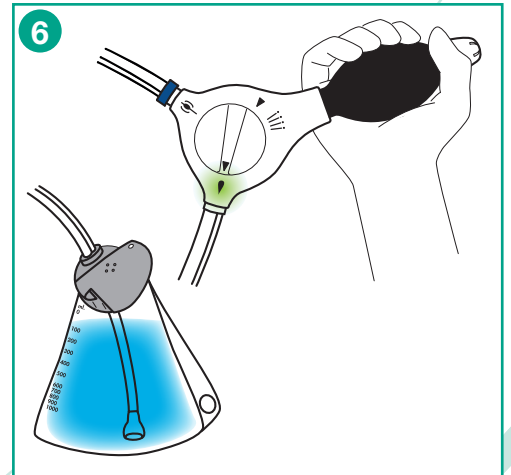

Yhteenveto

Vaihe 9. Avaa liittimet kannesta ja katetrusta. Tyhjennä jäljelle jäänyt vesi pussista ja letkuista.

- Hävitä kertakäyttöinen katetri roskien mukana.
- Tyhjennä jäljelle jäänyt vesi pussista ja letkuista.
- Kun laitat laitteen takaisin laukkuun, käännä valitsin lopetus symbolin  kohdalle.
- Varastoi tuote kuivassa paikassa, joka ei ole liian kuuma. Varmista, ettei letkut taitu varastoinnin aikana.

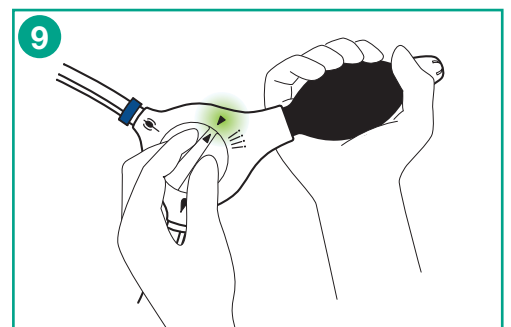

Peristeen suolihuuhtelulaite



Kierteellä kiinnitettävä korkki, jonka kautta säätöyksikkö yhdistetään vesipussiin. Korkissa on avautuva kansi.

Pussi vedelle.

Ohjausyksikkö, jolla säädetään veden ja ilman virtaus.

Pumppu, jolla aktivoidaan ballongi ja pumpataan vettä.

Liukastettu rektaalikatetri ballongilla, joka laitetaan peräsuoleen.

	Tuotekoodi		Järjestelmä	
Peristeen-suolihuuhtelu	29121		Järjestelmä	1 ohjauslaite 2 rektaalikatetria 1 pussi 2 nauhaa
	29122		Varusteyksikkö	15 rektaalikatetria 1 pussi
	29123*		Rektaalikatetri	10 rektaalikatetria
	29124*		Nauha	1 2 nauhan pakkaus
	29125		Letku	2 letkua, joissa siniset liittimet
	29126*		Järjestelmä	1 ohjauslaite 2 rektaalikatetria, pieni 1 pussi 2 nauhaa
	29127*		Varusteyksikkö	15 rektaalikatetria, pieni 1 pussi
	29128*		Rektaalikatetri	10 rektaalikatetria, pieni
* Ei saatavana kaikissa maissa				
Coloplast ei vastaa millään tavalla loukkaantumisista tai vahingoista, joita voi aiheutua, jos tätä tuotetta ei käytetä täysin yhtiön suositusten mukaisesti.				
		IFU11274 Coloplast-logo on Coloplast A/S:n rekisteröity tavaramerkki. © [2010-03.] Kaikki oikeudet pidätetään Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Tanska.		



Coloplast A/S
Suomen sivuliike
Rajatorpantie 41 C
01640 Vantaa
puh. (09) 894 6750
www.coloplast.fi